

Kurzanleitung Milchpumpe ARDO Calypso

01. a) Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in den Calypso Stromanschluss ein, wenn Sie die Milchpumpe im Netzbetrieb benutzen möchten.
b) Wenn Sie die Milchpumpe im Batteriebetrieb nutzen möchten, lösen Sie die Verriegelung und schieben den Deckel des Batteriefachs auf. Legen Sie 6 Batterien (1.5 V, AA) ein und schließen den Deckel wieder.
02. Schließen Sie den Schlauchadapter an die Milchpumpe an. Wenn Sie mit einem Einzelpumpset abpumpen möchten, lassen Sie die zweite Öffnung des Schlauchadapters geschlossen.
03. Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie auf die Ein-/Austaste drücken.
04. Wählen Sie eine Einstellung, die für Sie angenehm ist. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie zu Beginn eine Stimulationseinstellung mit niedriger Saugstärke (Vacuum) und hoher Saugfrequenz (Cycles) auswählen.
Beginnt die Milch zu fließen, reduzieren Sie die Saugfrequenz (Cycles) und erhöhen Sie die Saugstärke (Vacuum).
05. Sie können die Saugstärke (Vacuum) erhöhen durch Drücken des oberen Pfeiles, das Vacuum reduziert sich durch Drücken des unteren Pfeiles.
06. Sie können die Saugfrequenz (Cycles) erhöhen durch Drücken des oberen Pfeiles, die Saugfrequenz (Cycles) reduziert sich durch Drücken des unteren Pfeiles.

Wichtig vor der Anwendung:

- **Passende Brustglocke auswählen (Abb.1).**
- **Vor dem ersten Gebrauch Pumpsets Auskochen (z.B. ca. 2 Min. in kochendem Wasser).**
- **Falls Sie Batterien in das Gerät gelegt haben, nehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät mit dem Netzstecker an ein Stromnetz anschließen wollen.**

