

دليل استخدام مضخة الثدي من أردو (ARDO Calypso)

- أ. أدخل قابس التوصيل للشاحن الكهربائي في المكان المخصص له بجهاز مضخة الثدي (وصلة الشبكة) في حالة التشغيل باستخدام التيار الكهربائي.
- ب. في حالة تشغيل مضخة الثدي باستخدام البطاريات، أسحب غطاء البطاريات وقومي بوضع ٦ بطاريات من نوع (AA , 1.5 V) ثم أعيدي إغلاق الغطاء مجدداً.
٢. قومي بتركيب وصلة الخرطوم في مضخة الثدي. في حالة استخدام طقم المضخة المفردة , أتركي الفتحة الثانية من وصلة الخرطوم مغلقة.
٣. قومي بتشغيل مضخة الثدي وذلك عن طريق الضغط على زر التشغيل.
٤. قومي بإختيار الإعدادات التي تجدينها أكثر راحة بالنسبة لك. للبدء بمرحلة التحفيز ننصحك بقوة شفط قليلة (Vacuum) و مدى تكرار الشفط عالي (Cycles). عندما يبدأ الحليب بالتدفق قومي بزيادة قوة الشفط وقللي مدى تكرار الشفط.
٥. يمكنك زيادة قوة الشفط (Vacuum) عن طريق الضغط على السهم المتجه للأعلى , وخفضه عن طريق الضغط على السهم المتجه للأسفل.
٦. يمكنك زيادة مدى تكرار الشفط (Cycles) عن طريق الضغط على السهم المتجه للأعلى , وخفضه عن طريق الضغط على السهم المتجه للأسفل.

ملاحظات مهمة قبل الاستخدام:

- اختاري قمع الثدي المناسب (كما في الشكل رقم ١).
- يجب غلي ملحقات مضخة الثدي (Pumpsets) قبل الاستخدام للمرة الأولى (مثلاً: دقيقتين تقريباً في ماء مغلي).
- قومي بإخراج البطاريات من مضخة الثدي في حالة تشغيلها باستخدام التيار الكهربائي.

