

Süt pompası ARDO Calypso için kısa talimatname

1. a) Göğüs pompasını şebekeye bağlayarak kullanmak istiyorsanız, cihaz adaptörünün fişini Calypso güç bağlantısına takın.
b) Göğüs pompasını pille kullanmak istiyorsanız, mandalı çözün ve pil bölmesinin kapağını kaydırarak açın. 6 adet pil (1.5 V, AA) takın ve kapağı tekrar kapatın. (Piller dahil değildir)
2. Hortum adaptörünü süt pompasına takın. Tek bir pompa seti ile sütü pompalamak istiyorsanız, hortum adaptörünün ikinci deliğini kapalı bırakın.
3. Açma / kapama düğmesine basarak pompayı çalıştırın.
4. Sizin için uygun bir ayar seçin. Başlangıçta düşük vakumlu (emiş gücü) ve yüksek devirli (emiş frekansı) bir stimülasyon aşaması seçmenizi tavsiye ederiz.
Süt akmaya başlayınca devri düşürün (emiş frekansı) ve vakumu (emiş gücü) artırın.
5. Vakumu (emiş gücü) üst oka basarak yükseltebilir, alt oka basarak düşürebilirsiniz.
6. Üst oka basarak devri (emiş frekansı) yükseltebilir, alt oka basarak düşürebilirsiniz.

Kullanmadan önce önemli:

- **Uygun göğüs başlığını seçin (Şek.1).**
- **İlk kullanımdan önce pompası setini kaynatın (örneğin yaklaşık 2 dakika kaynar suda bekletin).**
- **Cihazı şebekeye bağlamak istiyorsanız pilleri cihazdan çıkarın.**

